

# Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

---

## Oversigt

Hæmatologi - fuldblod .....	2
Hæmatologi – plasma .....	3
Væske- og elektrolytbalance .....	3
Syre/base- og oxygenstatus .....	4
Hæmostase .....	4
Organmarkører .....	5
Sporstoffer og vitaminer .....	5
Metabolisme .....	6
Tumormarkører .....	6
Endokrinologi .....	7
Farmakologi .....	8
Immunologi og inflammation .....	9
Allergi .....	10
Urin og fæces .....	10

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

Hæmatologi - fuldblod		
NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod
		20-25 °C (klimaskab)
NPU01349	Basofilocytter;B	36 timer
NPU01933	Eosinofilocytter;B	8 timer
NPU01961	Erytrocytter, vol.fr.;B	2 døgn
NPU01960	Erytrocytter;B	2 døgn
NPU01944	Erytrocytv. Middel [MCV];Erc(B)	8 timer
NPU18162	Erytrocytv. rel. spredning;Erc(B)	3 døgn
NPU02321	Hæmoglobin [MCHC];Erc(B)	8 timer
NPU02319	Hæmoglobin;B	3 døgn
NPU02320	Hæmoglobinindhold [MCH];Erc(B)	36 timer
NPU02593	Leukocytter;B	36 timer
NPU02636	Lymfocytter;B	36 timer
NPU02840	Monocytter;B	36 timer
NPU02902	Neutrofilocytter;B	36 timer
NPU08694	Reticulocytter;B	24 timer
NPU03568	Trombocytter;B	2 døgn

[Gå til Oversigt](#)

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

### Hæmatologi – plasma

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpippeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU19763	Ferritin;P	10 timer	2 døgn	2 døgn
NPU02070	Folat;P,	10 timer	2 døgn	1 måned
NPU02508	Jern;P	10 timer	1 uge	3 måneder
NPU26470	Transferrin;P	10 timer	1 uge	Ubegrænset
NPU01700	Vitamin B12;P	10 timer	2 døgn	2 døgn

[Gå til Oversigt](#)

### Væske- og elektrolytbalance

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU19673	Albumin;P	10 timer	3 døgn	Ubegrænset
NPU01472	CO2 total;P(vB)	8 timer	3 døgn	1 måned
NPU03096	Fosfat;P	8 timer	2 døgn	2 måneder
NPU03230	Kalium;P	10 timer	1 uge	1 år
NPU01459	Karbamid;P	10 timer	1 uge	6 måneder
NPU04998	Kreatinin;P	10 timer	2 døgn	Ubegrænset
NPU02647	Magnesium;P	24 timer	1 uge	1 måned
NPU03429	Natrium;P	10 timer	1 uge	6 måneder
NPU03278	Protein;P	24 timer	3 døgn	6 måneder
NPU03688	Urat;P	10 timer	3 døgn	6 måneder

[Gå til Oversigt](#)

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

### Syre/base- og oxygenstatus

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU01472	CO2 total;P(vB)	8 timer	3 døgn	1 måned

[Gå til Oversigt](#)

### Hæmostase

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU21557	Antitrombin (enz.);P	4 timer	6 timer	2 måneder
NPU01682	Koag. overflade-induceret [APTT];P	4 timer	6 timer	1 måned
NPU01685	Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P	24 timer	24 timer	1 måned

[Gå til Oversigt](#)

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

### Organmarkører

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU19651	Alanintransaminase [ALAT];P	10 timer	1 uge	Anbefales ikke
NPU19652	Amylase;P	10 timer	1 uge	Anbefales ikke
NPU19654	Aspartattransaminase [ASAT];P	3 døgn	1 uge	3 måneder
NPU27783	Basisk fosfatase;P	10 timer	1 uge	4 døgn
NPU01370	Bilirubiner;P	24 timer	1 uge	6 måneder
NPU17181	Brain natriuretisk peptid [BNP];P	24 timer	1 uge	9 måneder
NPU19657	gamma-Glutamyltransferase;P	10 timer	1 uge	2 måneder
NPU19656	Kreatinkinase;P	10 timer	5 døgn	1 måned
NPU19658	Laktatdehydrogenase;P	10 timer	3 døgn	Anbefales ikke
NPU19894	Procollagen III, N-terminal propeptid;P	2 døgn	3 døgn	Mere end 1 uge

[Gå til Oversigt](#)

### Sporstoffer og vitaminer

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU10267	25-OH-Vitamin D(D3+D2);P	3 døgn	1 uge	1 uge
NPU03768	Zink;P	6 timer	1 uge	15 døgn

[Gå til Oversigt](#)

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

### Metabolisme

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU02195	Glucose;P(vB; fPt)	24 timer	3 døgn	1 år
NPU02192	Glukose;P	24 timer	1 uge	1 år
NPU27300	Hæmoglobin A1c (IFCC);Hb(B)	2 døgn	1 uge (fuldblod)	1 uge (fuldblod)
NPU01567	Kolesterol HDL;P	10 timer	1 uge	3 uger
NPU01566	Kolesterol;P	10 timer	2 døgn	3 uger
NPU18005	Proinsulin C-peptid;P(fPt)	6 timer	24 timer	24 timer
NPU04094	Triglycerid;P	10 timer	1 uge	6 måneder

[Gå til Oversigt](#)

### Tumormarkører

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU02043	alfa-1-Føtoprotein;P	2 døgn	3 døgn	1 måned
NPU01448	Cancer-antigen 125;P	2 døgn	3 døgn	1 måned
NPU19719	Carcinoembryonalt antigen;P	2 døgn	3 døgn	1 måned
NPU08669	Prostata-specifikt antigen;P	10 timer	2 døgn	2 døgn

[Gå til Oversigt](#)

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

<b>Endokrinologi</b>				
NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU01443	Calcium;P	10 timer	1 uge	1 år
NPU19579	Choriogonadotropin(hCG)+β-kæder;P	2 døgn	3 døgn	2 døgn
NPU04014	Follitropin [FSH];P	3 døgn	3 døgn	1 måned
NPU20182	Insulin;P (fPt)	6 timer	24 timer	> 1 døgn
NPU02618	Lutropin [LH];P	1 uge	1 uge	1 måned
NPU03028	Parathyrin [PTH];P	6 timer	3 døgn	Frarådes
NPU19894	Procollagen III, N-terminal propeptid;P	2 døgn	3 døgn	1 uge
NPU03242	Progesteron;P	2 døgn	2 døgn	2 døgn
NPU18247	Prolaktin;P	3 døgn	3 døgn	2 døgn
NPU03543	Testosteron;P	24 timer	36 timer	6 måneder
NPU27446	Thyroglobulin-antistof;P	8 timer	2 døgn	1 måned
NPU27547	Thyrotropin(TSH);P	1 uge	1 uge	2 uger
NPU03579	Thyroxin frit [T4];P	10 timer	2 døgn	2 døgn
NPU03624	Triiodthyronin [T3];P	8 timer	2 døgn	2 døgn
NPU01972	Østradiol;P	3 døgn	3 døgn	6 måneder

[Gå til Oversigt](#)

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

<b>Farmakologi</b>				
NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU01886	Digoxin;P	8 timer	2 døgn	4 måneder
NPU01992	Ethanol;P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU02613	Lithium;P	24 timer	1 uge	6 måneder

[Gå til Oversigt](#)



## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

### Immunologi og inflammation

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU19692	Antitrypsin;P	10 timer	1 uge	2 måneder
NPU28911	Cardiolipin-antistof (IgG);P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU28912	Cardiolipin-antistof (IgM);P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU19748	C-reaktivt protein [CRP];P	24 timer	3 døgn	3 år
NPU19947	Cykl.citrul.peptid-Ab(IgG) [CCP];P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU16393	DNA(dobbeltstrenget)-antistof;P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU19795	Immunglobulin A;P	1 uge	1 uge	1 måned
NPU19814	Immunglobulin G;P	1 uge	1 uge	1 måned
NPU19825	Immunglobulin M;P	1 uge	1 uge	1 måned
NPU17675	M-komponent;P	8 timer	10 døgn	1 måned
NPU09332	Mitochondrie-antistof;P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU29714	Nucleært antistof(IgG) gruppe [ANA];P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU16407	Rheumafaktor (IgM);P	8 timer	1 uge	6 måneder
NPU12229	Thyroidperoxidase-Ab;P	8 timer	2 døgn	2 døgn
NPU14566	Transglutaminase-Ab(IgA);P	8 timer	1 uge	1 måned
NPU18189	Transglutaminase-Ab(IgG);P	8 timer	1 uge	1 måned

[Gå til Oversigt](#)

## Oversigt over holdbarhed for komponenter, der kan rekvireres af praksis, som analyseres på Herlev og Gentofte Hospital

### Allergi

NPUkode	Komponent	Holdbarhed i fuldblod (ucentrifugeret) Klimaskab	Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse (ved gel eller afpipeteret)	
			2-8 °C	-20 °C
NPU02482	Immunglobulin E;P	1 uge	1 uge	2 uger
	Specifik Immunglobulin E;P	2 døgn	1 uge	Ubegrænset

[Gå til Oversigt](#)

### Urin og fæces

NPUkode	Komponent	Holdbarhed		
		20-25 °C (klimaskab)	2-8 °C	-20 °C
NPU19677	Albumin;U	3 døgn	3 døgn	6 måneder
NPU19717	Calprotectin;F	1 uge	1 uge	1 uge
NPU29057	Hæmoglobin;F (kun speciallæger)	2 uger	2 uger (i prøvetagningsglas)	4 uger (i prøvetagningsglas)
NPU03800	Kreatinin;Pt(U)	3 døgn	3 døgn	Ubegrænset
NPU09102	Kreatinin;U	3 døgn	3 døgn	Ubegrænset

[Gå til Oversigt](#)